

MEDIKRAMER
BABY CARE LINE



manual de instrucciones

USO PREVISTO: Retira exceso de mucosidad rápida y suavemente
Aspirador Nasal MDK8202



Advertencias de seguridad:

Antes de utilizar este dispositivo, lea las instrucciones de este manual. Conserve este manual que contiene información importante.

1. Este dispositivo no es un juguete, aléjelo del alcance de los niños.
2. La finalidad de este dispositivo es descongestionar narices atascadas, No lo utilice en otros orificios del bebé, como la boca o los oídos.
3. Limpie y seque antes y después de cada uso.
4. Límpielo siguiendo las instrucciones indicadas en este manual y NO lo sumerja en el agua. No es un dispositivo impermeable.
5. No introduzca profundamente la punta de silicona en la fosa nasal.
6. No lo use en el bebé durante mucho tiempo, bastan unos segundos.
7. No lo utilice si hay alguna herida, hemorragia o inflamación nasal.
8. En caso de infección, fiebre, hemorragia o irritación nasal deje de utilizarlo y consulte con su médico.
9. Este dispositivo está destinado a uso personal.
10. La parte que se aplica es la punta de silicona.
11. No está permitida ninguna modificación del aparato.
12. Frecuencia de trabajo: 30 segundos ENCENDIDO/ 2 minutos APAGADO.
13. Sustituya las pilas cuando se debilite la potencia de succión.



Advertencias sobre las pilas:

Utilice únicamente pilas alcalinas

1. No mezcle pilas usadas y nuevas.
2. No mezcle pilas alcalinas y normales (C-Zn) o recargables (Ni-Cd).
3. Utilice sólo pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado.
4. Introduzca las pilas con la polaridad como se indica en el manual.
5. Debe sacar las pilas gastadas del dispositivo.
6. Asegúrese de que los contactos están limpios antes de introducir las pilas.
7. Si la pila se cambia por otra de tipo incorrecto hay riesgo de explosión.
8. Quite las pilas si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo.


CONTENIDO

- 1 Unidad principal: aspirador nasal eléctrico
 - 2 Puntas de silicona
 - 1 Manual instrucciones
 - 1 Tubo de limpieza
 - 2 Aros de silicona de repuesto
- Requiere 2 pilas 1,5V AA (No incluidas)

DESCRIPCION DE LAS PARTES



INSTRUCCIONES DE USO

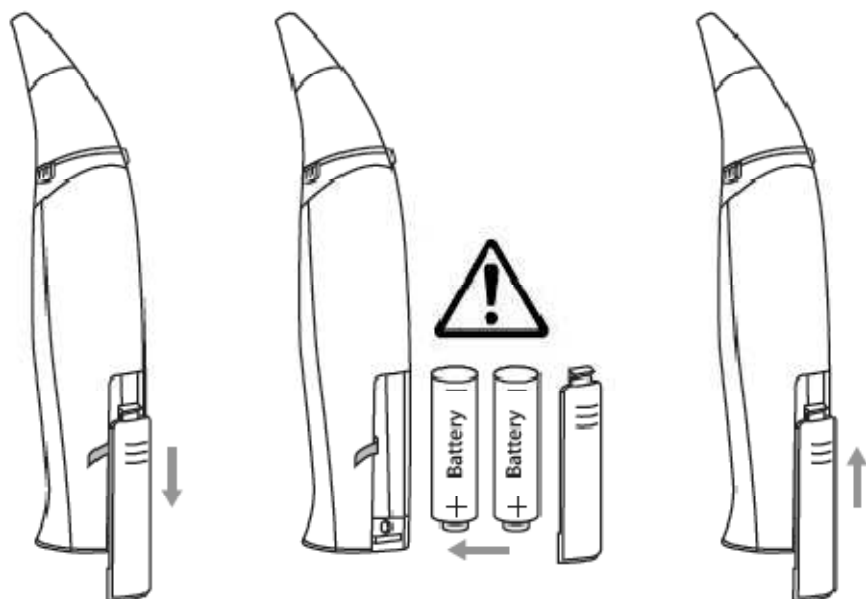


1. Retire la tapa de las pilas como se indica.
2. Introduzca 2 pilas alcalinas AA-1,5V (no incluidas).
3. Coloque la tapa de las pilas, como se indica.

4. Utilice la punta de silicona que corresponda según el tamaño de las fosas nasales.




5. Asegúrese de colocar la punta de silicona fijamente sobre el recipiente de mucosidades.

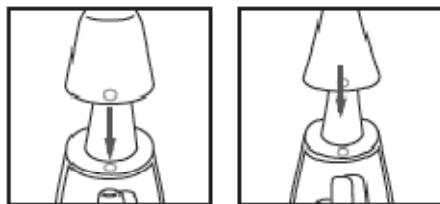

6. Introduzca suavemente la punta de silicona en la fosa nasal. No lo haga profundamente.




7. Presione el pulsador durante unos segundos para recoger el moco.

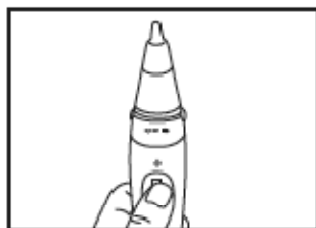

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Retire la punta de silicona.

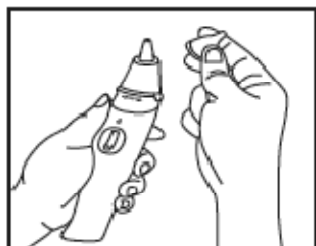


2. Sujete los dos tiradores de la base con los dedos índice y pulgar y gire la base desenroscando en sentido contrario a las agujas del reloj siguiendo la indicación "open →" y seguidamente tire del recipiente hacia arriba.




3. Mantenga el recipiente invertido boca abajo. Use los dedos índice y pulgar y gírelo desenroscando en el sentido de las agujas del reloj siguiendo la indicación "open →".






4. Retire el aro de silicona del recipiente.

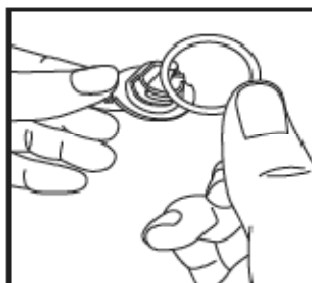


5. Lave las 4 piezas con jabón y agua templada.
Después, si lo desea, las puede esterilizar con vapor o agua hirviendo.

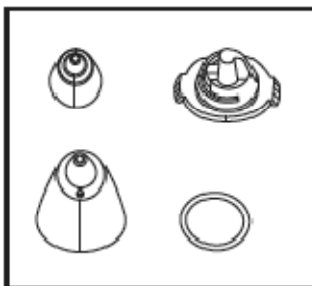

6. Junte de nuevo las piezas como se indica:

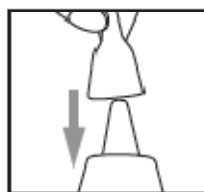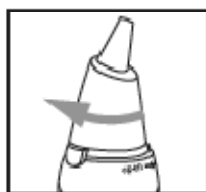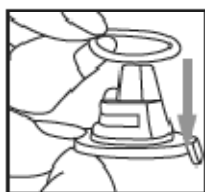


7. Asegúrese de que todas las piezas encajan y estén alineadas con las marcas.

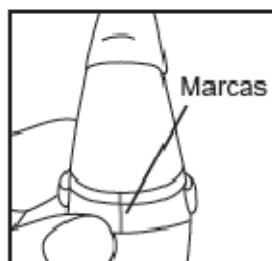




Introduce el moco en la tapa de aspiración, siga los siguientes pasos.


1. Utilice el tubito de limpieza.
Coloque el tubo de limpieza en el orificio de succión.

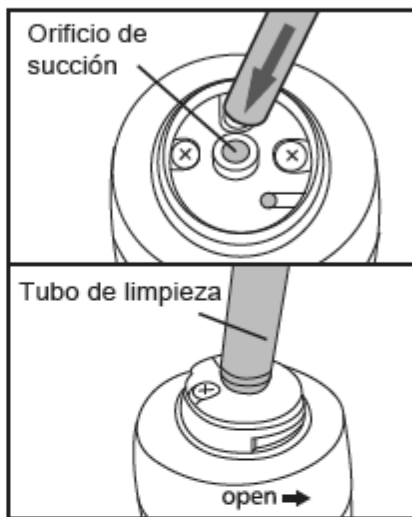

2. Ponga el tubo de limpieza en agua y presione el pulsador durante 30 segundos.

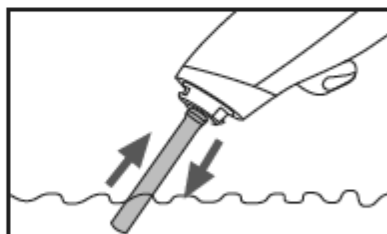

3. Seguidamente, saque el tubo del agua y presione el pulsador para expulsar el agua hasta que quede completamente seco. Retire el tubo y guardelo.

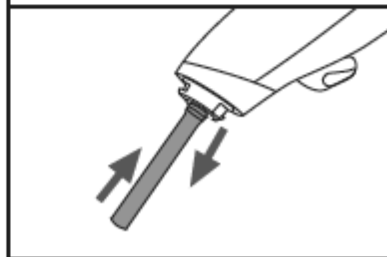

Certificaciones y normativas:

Se ajusta a las disposiciones establecidas por la directiva comunitaria de dispositivos médicos 93/42/CE.

Directiva 2004/108/CE de compatibilidad electromagnética:

-Emisión: CISPR 11:2003+A1:2004, Clase B. Equipamiento de radio frecuencia, industrial, científico y médico (ISM)

-Características de alteración electromagnética

-Límites y métodos de medida. Clase B

-Equipamiento para uso en establecimientos domésticos.

-Inmunidad: IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2008, IEC 61000-4-8:2009

Directiva (RoHS) 2002/95/CE de restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipamiento eléctrico y electrónico

Normas aplicadas al diseño y fabricación del dispositivo:

EN 60601-1 Equipamiento médico eléctrico – Parte 1: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial

EN 60601-1-2 Equipamiento médico eléctrico – Parte 1-2: Requisitos generales para la seguridad básica y funcionamiento esencial - Garantías standard:

Compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 4: Pruebas y requisitos

EN ISO 10993-5 Evaluación biológica de dispositivos médicos - Parte 5:

Pruebas de citotoxicidad in vitro

EN ISO 10993-10 Evaluación biológica de dispositivos médicos - Parte 10:

Pruebas de irritación e hipersensibilidad de tipo retardado.

EN ISO 10993-12 Evaluación biológica de dispositivos médicos - Parte 12:

Preparación de muestras y materiales de referencia

Especificaciones:

Ambiente de funcionamiento	Temp.: 10°C ~ 40°C Humedad: ≤ 95%
Transporte y almacén	Temp.: -10°C ~ 50°C Humedad: ≤ 95%
Alimentación	2 pilas alcalinas 1,5V AA